


Den **Enkleste & Billigste** elektroniske medicinblanderblander!

Har ikke alle de funktioner som vores kendte "Millimix" medicinblandere.

Men den enkle betjening er bevaret (ibland % stilles i displayet med op/ned pilene)

Er så enkel i brug at instruktionen kan finde plads på denne brochureside!

Dosering af ren syre fra 0,05%.

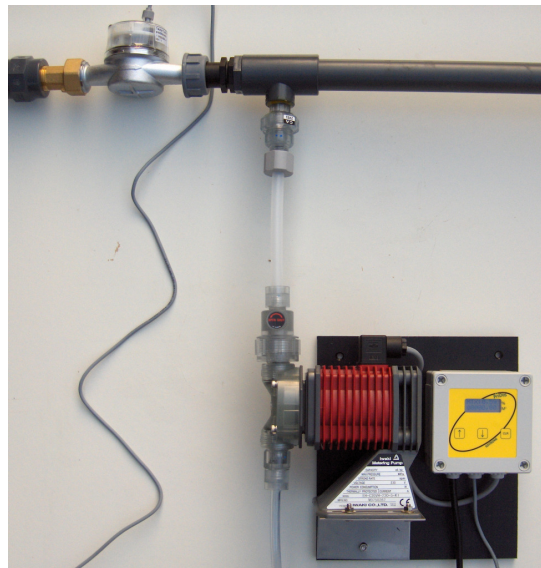

Installation : Vandmåler med injektionsventil indsættes på vandstrengen hvori dosering ønskes. Fra pumpens afgang til injektionsventil ved vandmåler føres tryksslange. (Omløbere aftages og sættes på slangen. Slangen presses på stutsene, og omløberen fastspændes igen. (med fast hånd – undgå værktøj). **HUSK MAX VANDTRYK 3,5 BAR.**

Den grå pulsledning isættes vandmåler (Husk at fjerne beskyttelses-prop i vandmåleren).

Opstart: Indstil ibland %
Lad pumpen ansuge (Tryk "CLR" % "OP" pil samtidig)
Mislykkes ansugning : Løsen udluftskrue v.pumpeafgang – Sug evt.m.stor injektionssprøjte på udluftningsslangen indtil væsken når pumpen.

Styrepanel

Manuel aktivering af pumpe (for ansugning):
Tryk "CLR" & "OP PIL" samtidig
(aktiver "CLR" først for at undgå at ændre ibland %.)

"OP/NED" pil indstiller ibland %
"CLR" 0 stiller vandmåler.

Alarmtekst "Owerflow"
Indikerer at pumpens kapacitet er overskredet.
(Øg koncentration /Nedsæt flow)

Den leverede vandmåler giver 1 puls/1
Om ønsket kan denne opsætning ændres:
Tryk "OP/NED" samtidig .PPL kan så
Ændres med pilene & godkendes med "CLR"

